

# エヌエス NSフェイスクケアマスク

顔への密着性が良く、ジャストフィットするマスク

形状を維持し、顔と隙間ができてにくい金属入りノーズピース

耳が痛くなりにくいソフトな平ゴム(ラテックスフリー)

呼吸がしやすく、毛羽立ちにくい不織布

顔の形状にフィットするアール(半円)型のサイドシール

表と裏がわかりやすいロゴマーク



## 特徴

- 高性能フィルターを使用した不織布3層構造イヤループタイプのサージカルマスクです。
- マスク両端の溶着形状の工夫によりマスクと顔との密着性が良くなりました。
- 衛生的なバージンパルプ化粧箱に経済的な50枚包装にいたしました。

## 米国の医療用マスク規格 ASTM F2100-11 レベル1に適合したサージカルマスク

細菌濾過効率: BFE	> 98%
微粒子捕集効率: PFE	> 98%
圧力損失: ΔP	< 4mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup>
延焼性	クラス1
人工血液バリア性	80mmHg

## マスクの着用方法 「Nissho」ロゴマークが外側に表示されるように装着してください。



**1**  
ノーズピースのある方を上に、プリーツが上を向いている面を口側にあててください。



**2**  
ゴムひもを無理なくひっぱって耳にかけてください。



**3**  
ノーズピースを鼻の両側で押さえてピッタリとフィットさせてください。



**4**  
下側を引きプリーツを充分伸ばして、鼻からあごまで覆うようにしてください。

※顔とマスクの間にすき間ができてしまうと本来の性能が得られません。

※着用方法に従って、鼻からあごを覆うように正しく装着してください。

商品コード	商品名	色	サイズ	入数	包装
14851	NSフェイスクケアマスク	ホワイト	175x90mm	3000枚	50枚×60箱
14852		ブルー			
14853		ピンク			
14861	NSフェイスクケアマスク・S	ホワイト	145x90mm		
14863		ピンク			

販売元

**lissho 日昭産業株式会社**

メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ  
〒105-8567 東京都港区虎ノ門4-3-13  
TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

●お求めは下記の代理店へ