

エヌエス エプロン

- 汚物や吐しゃ物などが広範囲に飛散する場合。
- 衣類の前腕部を汚染しやすい処置を行う場合。

- 感染力が強いウイルスや菌が多くあると思われる現場など、使用状況に応じて袖つき・袖なしを使い分けてください。

袖つきエプロン



個包装タイプや化粧箱タイプがございます。

袖口形状は2タイプ

ゴムそで



袖口にゴム素材を使用しています。


サムフック



袖口は親指が引っかけられる形状になっています。

防水性に優れた
ポリエチレン製エプロンです。

腰部のひもで身体に
フィットします。

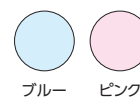

ブルー ピンク

商品コード	商品名	カラー	全長(cm)	入数	JANコード
51603	ディスポエプロン (個包装)	ブルー	112	240枚 (1枚×60枚×4箱)	4523992516039
51604	ディスポエプロン	ブルー	112	200枚 (10枚×20箱)	4523992516046
51605	ディスポエプロン L	ブルー	117	200枚 (10枚×20箱)	4523992516053
51610	ディスポエプロン ライト	ブルー	112	300枚 (15枚×20箱)	4523992516107
51611		ピンク		300枚 (20枚×15箱)	4523992516114
51615	ディスポエプロン サムフック	ブルー	112	300枚 (15枚×20箱)	4523992516152
51616	ディスポエプロン サムフック L	ブルー	117	300枚 (15枚×20箱)	4523992516169

エプロンの着脱方法 (例)

【着け方】

1



首の部分を持って
かぶる。

2



片腕をエプロン
の袖に通す。

3



反対の腕をもう
片方の袖に通す。

4



腰ひもを結ぶ。

【外し方】

1



首の部分を持って
体の前に強く
引き、首ひもを
切る。

2



ガウンの表側に
触れないよう注
意し、裏返すよ
うにして脱ぐ。

3



ガウンの裏側を
持ち、片腕づつ
脱ぐ。

4



表側が内側にな
るようにまとめ、
体の前方へ強く
引き、腰ひもを
切り小さくたた
んで、廃棄する。

袖なしエプロン



一枚ずつ取り出せる化粧箱入りです。



袖なしエプロン装着時に便利な
アームカバー。

ネック部分のミシン目をカットし襟元の
調節が可能です。

「プラスチックエプロン80・ワイド」は
肩部の幅が広がっています。


腰部のひもで身体にフィットします。

防水性に優れたポリエチレン製エプロンです。



商品コード	商品名	カラー	全長(cm)	入数	JANコード
51600	アームカバー	-	40	200枚(50枚×4袋)	4523992516008
51602	不織布エプロン	ホワイト	98	100枚(1枚×100袋)	4523992516022
51606	アルファエプロン	ホワイト	130	600枚(50枚×12箱)	4523992516060
51607		ピンク			4523992516077
51608		ブルー			4523992516084
51621	プラスチックエプロン80・ワイド	ホワイト	120	960枚(80枚×12箱)	4523992516213
51622		ピンク			4523992516220
51623		ブルー			4523992516237
51626	プラスチックエプロン80	ホワイト	120	960枚(80枚×12箱)	4523992516268
51627		ピンク			4523992516275
51628		ブルー			4523992516282

※「アルファエプロン」は厚手で丈が長い仕様になります。

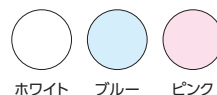

ホワイト ブルー ピンク

エプロンの着脱方法(例)

【着け方】

1



首の部分を持ってかぶる。

2



腰ひもを後ろで結ぶ。

【外し方】

1



首の部分を持って体の前に強く引き、首ひもを切る。

2



表側が内側になるように腰ひもの高さで2つに折り、表側に触れないよう裾をすくい上げる。

3



表側が内側になるようまとめる。

3




体の前方へ強く引いて腰ひもを切り、表側に触れないよう注意しながら、廃棄する。

ホルダー(グローブ・エプロン用)

- マグネット付き、マグネット無しの2種類ございますので、使用環境に応じて設置が可能です。
- ステンレス製なので軽くて丈夫です。

商品コード	商品名	仕様	サイズ(mm)
54407	ホルダー (グローブ・エプロン用)	マグネット付き	270×95×125
54408		マグネット無し	

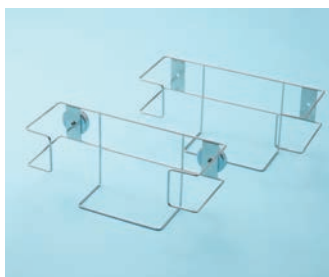

- お求めは下記の代理店へ

販売元

nissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683