

エヌエス マスク(シールド付)

アイシールドマスク

- 液体バリアに優れ、液体などの飛散から目・鼻・口など顔面を保護します。
- シールド本体及びマスクにシールドがくもりにくい加工をしています。
- 化粧箱の底面2か所のフック穴(ミシン目)を開けて壁にかけて使用できます。



ASTM F2100-19
レベル3に適合

JIS T 9001
クラスⅢに準拠

商品コード	商品名	カラー	入数	JANコード
14771	アイシールドマスク	ブルー	300枚(50枚×6箱)	4523992147714

マスクの着脱方法(例)

顔とマスクの間にすき間ができてしまうと本来の性能が得られません。着用方法に従って、鼻からあごを覆うように正しく装着してください。



シールドの保護不織布を取り外し、中央の凹みに合わせて、ノーズピースを鼻の形に合わせて曲げてください。



ノーズピースの折り曲げた部分を鼻にあて、ゴムひもを無理なくひっぱって耳にかけてください。



マスク本体の下側を引き、プリーツを十分に伸ばして、あごまで覆うようにしてください。



シールド及びマスク本体の外側を触らないようにゴムひもを持って取り外してください。

●お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683