

エヌエス ニトリルグローブ

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 (JMDNコード:70976000)

届出番号:13B3X0014200013

ユニケアニトリルグローブ

- 優れた伸縮性とフィット感
- テープが貼り付きにくい
- 指先に滑り止め加工
- 耐薬品性により優れている
- 食品衛生法適合




商品コード	商品名	カラー	サイズ	入数	JANコード
19270	ユニケアニトリルグローブ	ライラック ブルー	SS	2,000枚(200枚×10箱)	4523992192707
19271			S		4523992192714
19272			M		4523992192721
19273			L		4523992192738


ユニケアニトリルグローブ 抗がん剤耐性テスト (ASTM D6978-05)

薬剤名				結果
ボルテゾミブ (ベルケイド)	1.0mg /ml (1,000ppm)	オキサリプラチン	2.0mg /ml (2,000ppm)	240分まで 透過せず
カルボプラチン	10.0mg /ml (10,000ppm)	パクリタキセル	6.0mg /ml (6,000ppm)	
シクロホスファミド	20.0mg /ml (20,000ppm)	ペメトレキセド	25.0mg /ml (25,000ppm)	
エトポシド	20.0mg /ml (20,000ppm)	硫酸ビンクリスチン	1.0mg /ml (1,000ppm)	
フルオロウラシル	50.0mg /ml (50,000ppm)	イホスファミド	50.0mg /ml (50,000ppm)	
ゲムシタピン	38.0mg /ml (38,000ppm)	ミトキサントロン	2.0mg /ml (2,000ppm)	
イリノテカン	20.0mg /ml (20,000ppm)			


サイズ選びの目安 (掌幅部分)

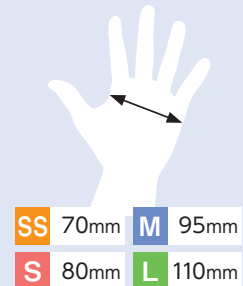

グローブの着け方 (例)

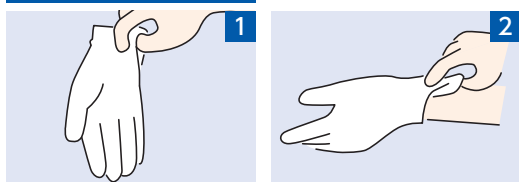

1 手指衛生をした後、グローブの手首部分を持ちます。
2 親指の位置を確認して手を入れます。

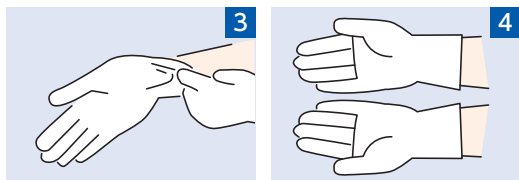


3 反対の手も同様にグローブを着けます。
4 手首が出ないようにガウンの袖口まで覆います。

グローブの外し方 (例)



1 グローブの手首部分の外側をつまみ、内側に触れないようにグローブをめくります。
2 汚染された外側が内側になるように外していきます。
3 外したグローブは、もう片方の手で握ります。

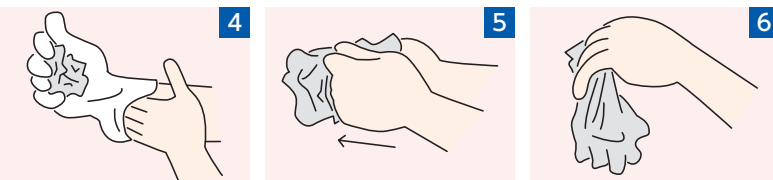

4 グローブを外した手で、汚染された外側に触れないように、もう片方のグローブの内側を持ち上げます。
5 もう片方のグローブも汚染された外側が内側になるように外していきます。
6 外したグローブを廃棄し、手指衛生をします。

●お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

エヌエス ニトリルグローブ

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋(JMDNコード:70976000)

ハンドプロニトリルグローブ

届出番号:13B3X00142000012



- 優れた伸縮性とフィット感
- テープが貼り付きにくい
- 指先に滑り止め加工
- 耐薬品性により優れている
- 食品衛生法適合



商品コード	商品名	カラー	サイズ	入数	JANコード
19250	ハンドプロニトリルグローブ	ライラック ブルー	SS	3,000枚(300枚×10箱)	4523992192509
19251			S		4523992192516
19252			M		4523992192523
19253			L		4523992192530

アルファニトリルグローブ

届出番号:13B3X00142000008

- 優れた伸縮性とフィット感
- テープが貼り付きにくい
- 指先に滑り止め加工
- 耐薬品性により優れている
- 食品衛生法適合



商品コード	商品名	カラー	サイズ	入数	JANコード
19180	アルファニトリルグローブ	ホワイト	SS	2,000枚(200枚×10箱)	4523992191809
19181			S		4523992191816
19182			M		4523992191823
19183			L		4523992191830

ニトリルグローブ セミロング

届出番号:13B3X0014200009

- ガウンの袖口もカバーできる長さ
- 厚手で強度にも優れている
- 耐薬品性により優れている
- 指先に滑り止め加工
- 食品衛生法適合



パウダーフリー

ラテックスフリー




商品コード	商品名	カラー	サイズ	入数	JANコード
19191	ニトリルグローブ セミロング	ブルー	S	1,000枚(100枚×10箱)	4523992191915
19192			M		4523992191922
19193			L		4523992191939

ニトリルグローブ 抗がん剤耐性テスト (ASTM D6978-05)


薬剤名	濃度	結果	ハンドプロ	アルファ	セミロング
メトトレキサート	25.0mg / ml(25,000ppm)	240分まで通過せず	○	○	○
シスプラチン	1.0mg / ml(1,000ppm)		○	○	○
シクロホスファミド	20.0mg / ml(20,000ppm)		○	○	○
ダカルバジン	10.0mg / ml(10,000ppm)		○	○	○
塩酸ドキソルビシン	2.0mg / ml(2,000ppm)		○	○	○
エトポシド	20.0mg / ml(20,000ppm)		○	○	○
フルオロウラシル	50.0mg / ml(50,000ppm)		○	○	○
パクリタキセル	6.0mg / ml(6,000ppm)		○	○	○
硫酸ビンクリスチン	1.0mg / ml(1,000ppm)		○	○	○
イホスファミド	50.0mg / ml(50,000ppm)		-	-	○
マイトマイシンC	0.5mg / ml(500ppm)		-	-	○
ミトキサントロン	2.0mg / ml(2,000ppm)		-	-	○

サイズ選びの目安 (掌幅部分)

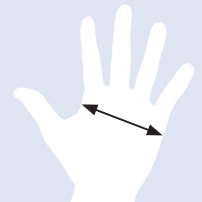


SS	70mm
S	80mm
M	95mm
L	110mm

グローブの着け方 (例)

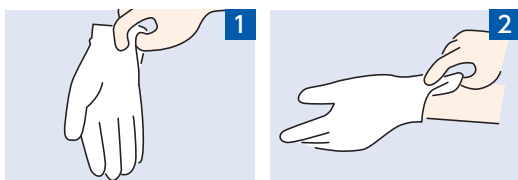

1 手指衛生をした後、グローブの手首部分を持ちます。

2 親指の位置を確認して手を入れます。

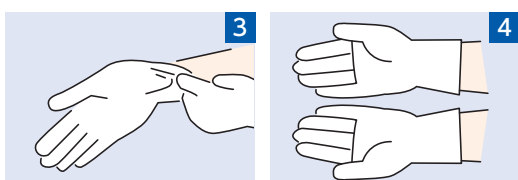

3 反対の手も同様にグローブを着けます。

4 手首が出ないようにガウンの袖口まで覆います。


グローブの外し方 (例)



1 グローブの手首部分の外側をつまみ、内側に触れないようにグローブをめくります。

2 汚染された外側が内側になるように外していきます。

3 外したグローブは、もう片方の手で握ります。

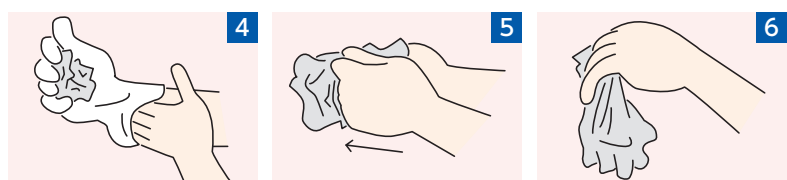

4 グローブを外した手で、汚染された外側に触れないように、もう片方のグローブの内側を持ち上げます。

5 もう片方のグローブも汚染された外側が内側になるように外していきます。

6 外したグローブを廃棄し、手指衛生をします。

●お求めは下記の代理店へ

販売元

nissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683