


# エヌエス 高吸水シート

## アンダーパッド/アンダーシート

- 不織布・吸水紙・高吸収ポリマー・フィルムを用いた製品です。
- 多量の液体を素早く吸収し、液漏れを防ぎます。
- 防水シートの目的で、ベッド・手術台・診察台等にご使用できます。おむつ交換時等の介護用シートとしてもご使用できます。
- ボトムシートの色はブルーとホワイトの2色あります。



不織布	フィルム加工
吸水紙 高吸収 ポリマー	優れた 吸水性 防水性

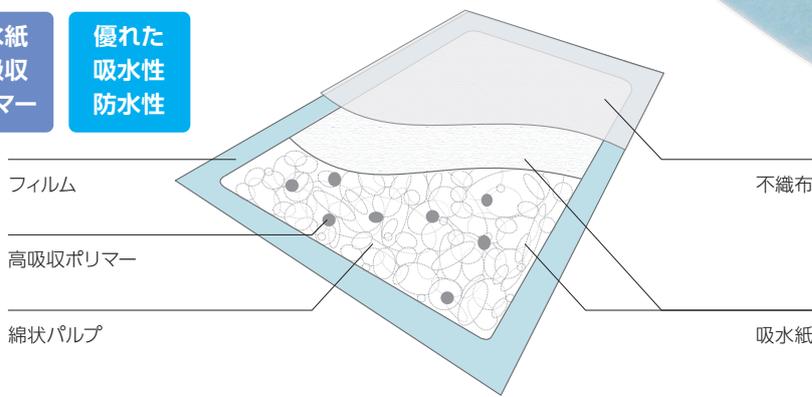

商品コード	商品名	サイズ(mm)	入数	目安吸水量(cc)	JANコード
18060	アンダーパッド 300×450	300×450	400枚(50枚× 8袋)	300	4523992180605
18061	アンダーパッド 450×600	450×600	240枚(40枚× 6袋)	650	4523992180612
18062	アンダーパッド 600×900	600×900	120枚(30枚× 4袋)	1400	4523992180629
18063	アンダーパッド 760×760	760×760	120枚(30枚× 4袋)	1500	4523992180636
18070*	アンダーパッド 800×1800	800×1800	80枚(10枚× 8袋)	1300	4523992180704
18052	アンダーシートホワイト 600×900	600×900	100枚(10枚× 10袋)	1200	-
18053	アンダーシートホワイト 900×1200	900×1200	50枚( 5枚× 10袋)	2400	-
18054	アンダーシートホワイト 450×600	450×600	200枚(50枚× 4袋)	600	-

\*部分吸水タイプ(吸水部700×760mm)

●お求めは下記の代理店へ

販売元


**lissho** 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

# エヌエス 粘着吸水シート

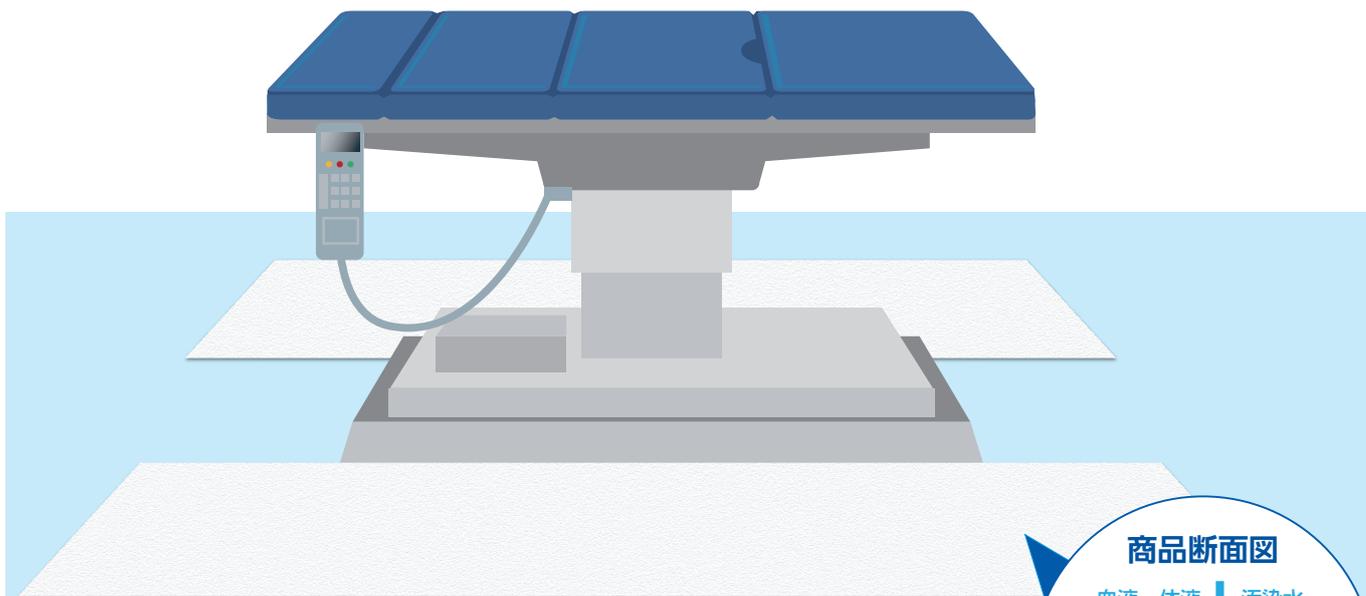


## 商品断面図

血液・体液 ↓ 汚染水



床


## シートの使用方法

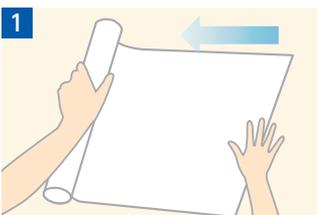

1 シートの粘着面を床に向け、広げたい場所に置き、シートの端を床に押し付けるように固定します。



2 シートを床に押し付けながらゆっくりと貼り付けてください。

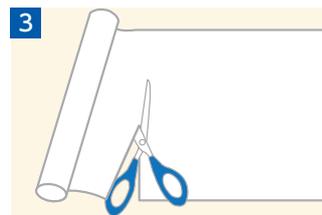

3 貼り付けてから、お好みのサイズにハサミやカッターで切ってください。

使用場所:手術室、内視鏡室、カテ室、救急外来、洗い場 など

## 床に直接貼れる

- 接地面に粘着性があり床に直接貼れます。
- 固定用テープ不要なので作業性が向上します。
- 使用後、シートを剥がしても床に跡が残りません。

## 用途に応じて好みのサイズに

- ロール形状なので好みの長さのカットしてご使用頂けます。
- 50cm幅と100cm幅をご用意していますので使用場所によって使い分けが可能です。
- 18322と18323は一定間隔でミシン目が入っておりハサミやカッターを使わずにカットできるのでお1人での設置も簡単です。

## 吸水・防水機能で清潔

- 表面の吸水性不織布で汚染水等をキャッチします。
- 裏面に防水フィルムをラミネートしているので床面に水分を通しません。
- 滑りやすい床にも表面の防滑機能で転倒防止対策が可能です。

### 【注意点】

- ・ 床面の状態によって粘着しにくい場合がありますので、ほこり等を拭き取ってからご使用ください。
- ・ ロール外側に粘着層があります。
- ・ 保管方法につきましては製品に使用されている包装用フィルムで包装して、湿度の低い冷暗所で保管をお願い致します。

商品コード	商品名	仕様	入数	JANコード
18320	粘着吸水シート 50	50cm 幅×50m	2巻	4523992183200
18321	粘着吸水シート 100	100cm 幅×50m	1巻	4523992183217
18322	粘着吸水シート 100 ミシン目2Mピッチ	100cm 幅×50m 200cm 間隔 ミシン目入り	1巻	4523992183224
18323	粘着吸水シート 100 ミシン目1Mピッチ	100cm 幅×50m 100cm 間隔 ミシン目入り	1巻	4523992183231