

エヌエス プラスチックグローブ




- 指先までよくフィットし、細やかな作業に適しています。
- サイズの違いが見分けやすいように箱の色をわけています。
- 塩化ビニール製です。



スーパーマイルドグローブとハンドケアグローブの中箱は両面取り出し口仕様

手袋の袖口部分をつかんで取出せるので、衛生的にお使いいただけます。

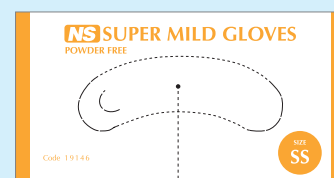

取り出し口が2つあります。

スーパーマイルドグローブ

薄手



商品コード	商品名	サイズ	入数	JANコード
19146	スーパーマイルドグローブ	SS	2,000枚(100枚×20箱)	4523992191465
19147		S		4523992191472
19148		M		4523992191489
19149		L		4523992191496
19145		LL		4523992191458

ハンドケアグローブ

厚手



商品コード	商品名	サイズ	入数	JANコード
19160	ハンドケアグローブ	SS	1,000枚(100枚×10箱)	4523992191601
19161		S		4523992191618
19162		M		4523992191625
19163		L		4523992191632
19164		LL		4523992191649


ソフトフィールグローブ



商品コード	商品名	サイズ	入数	JANコード
19135	ソフトフィールグローブ	SS	2,000枚(100枚×20箱)	4523992191359
19136		S		4523992191366
19137		M		4523992191373
19138		L		4523992191380


グローブの着脱方法

グローブの着け方(例)

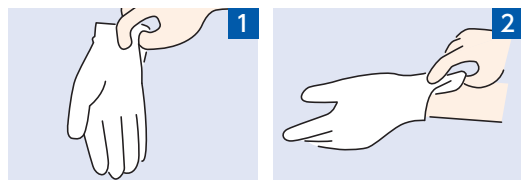

手指衛生をした後、グローブの手首部分を持ちます。

親指の位置を確認して手を入れます。

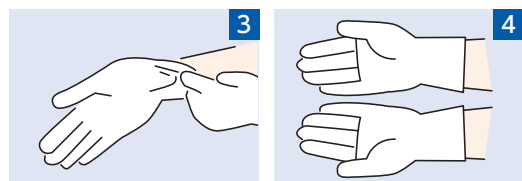

反対の手も同様にグローブを着けます。

手首が出ないようにガウンの袖口まで覆います。


グローブの外し方(例)



グローブの手首部分の外側をつまみ、内側に触れないようにグローブをめくります。

汚染された外側が内側になるように外していきます。

外したグローブは、もう片方の手で握ります。

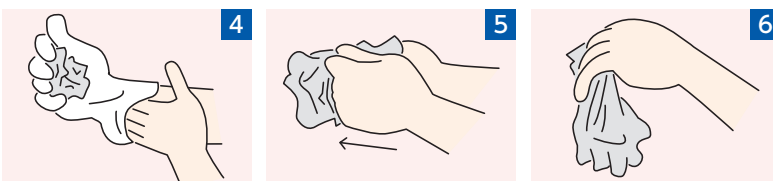


グローブを外した手で、汚染された外側に触れないように、もう片方のグローブの内側を持ち上げます。

もう片方のグローブも汚染された外側が内側になるように外していきます。

外したグローブを廃棄し、手指衛生をします。

ホルダー(グローブ・エプロン用)

- マグネット付き、マグネット無しの2種類ございますので、使用環境に応じて設置が可能です。
- ステンレス製なので軽くて丈夫です。

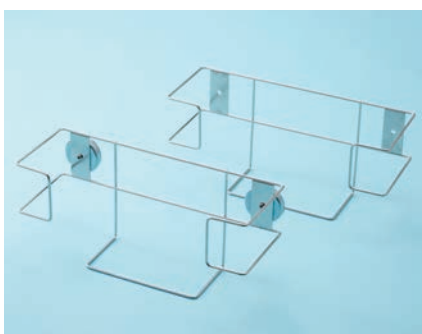

商品コード	商品名	仕様	サイズ(mm)
54407	ホルダー(グローブ・エプロン用)	マグネット付き	270×95×125
54408		マグネット無し	

●お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683